


安全にご使用いただくために

重要：本来の目的以外のご使用はしないでください。（使用方法は添付のDVDをご覧ください）

重要：踏み台替わりに使用しないでください。


重要：分解しますと、ネジロック、ダブルナットによる固定が外れ、ネジゆるみ止め機能がなくなります。分解したものの機能補償は致しかねます。

「ささえさん」の各部名称と機能

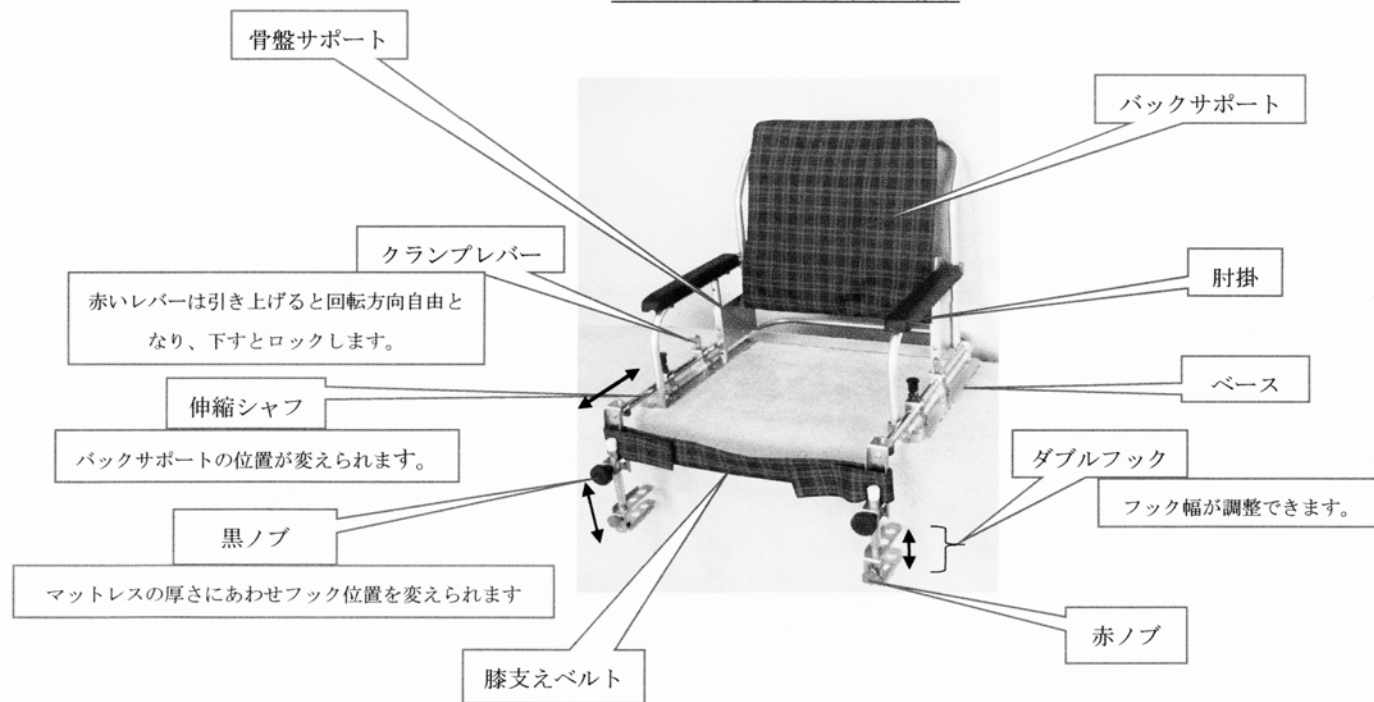

補償：製造より一年以内のメーカー責かかわる故障は無償修理いたします。

「ささえさん」の使い方

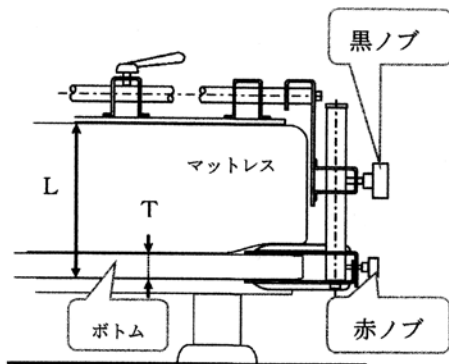


1) 使用前設定


最初にベッドのマットレス及びボトムの厚さにフック位置を合わせてください。

- ① ダブルフックの幅を“T”寸に合わせ赤ノブ を締める。
- ② ダブルフックの位置を“L”寸に合わせ黒ノブ を締める。


合わせ終わったら掛け金具を180度回し上に向け、伸縮シャフトを縮め、クランプを締める

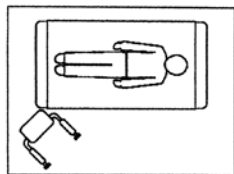


2) 使用前設定を終えたささえさんはベッドの足元の床に置きます。

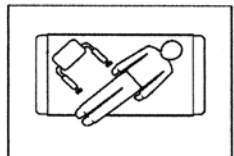

3) 利用者の足を手前に移動しささえさんをベッドの上に置きます。

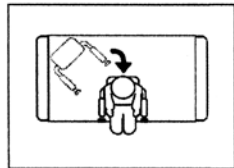

4) 利用者を起こしベッドの横に座った状態の所へ、ささえさんをマットの上を滑らせて差し込みます。

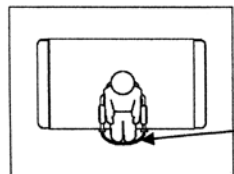

5) 掛け金具を引き出しボトムに掛けて、クランプレバーを締めます。
必要に応じて膝支援ベルトを着けます。